



## DESRIPTIF

Wellion® FRIGO est une poche thermique qui permet de protéger l'insuline (en flacon, cartouche ou stylo prérempli). Elle est disponible en deux tailles : L et XXL.

L'insuline doit être conservée à une température ambiante qui ne dépasse pas les 30°C pour que son activité biologique et thérapeutique soit garantie. Cela peut représenter un problème l'été, quand on passe la journée en dehors de chez soi, ou bien lors de voyages. Il est donc nécessaire de protéger son insuline.

Les poches Wellion® sont :

- Antibactériennes : la poche interne est dotée d'un revêtement antibactérien.
- Ne nécessitent pas d'alimentation électrique.
- Fonctionnent sans accumulateur ni pain de glace ; elles sont donc 100% nomades.



Les poches Wellion® FRIGO s'activent simplement avec de l'eau. Elles sont faciles et rapides d'utilisation puisqu'il suffit de faire gonfler les cristaux qu'elles contiennent sous l'eau du robinet. Autonomes en énergie, elles ne nécessitent ni électricité ni source de froid et offrent donc autonomie et liberté aux patients en traitement insulinaire.

Elles sont durables dans le temps car il suffit de les réhydrater pour compenser l'évaporation quand nécessaire, et elles peuvent être réutilisées aisément. Pratiques pour le transport, les poches Wellion® FRIGO peuvent être utilisées pour transporter également le matériel pour l'autosurveillance de la glycémie ou d'autres produits et les protègent des chocs.



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

<b>CLASSIFICATION</b>	Poche thermique		
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	Dimensions	<b>Wellion® FRIGO L</b> 11 cm (L) × 21 cm (H)	<b>Wellion® FRIGO XXL</b> 19 cm (L) × 21 cm (H)
	Capacité de contenance	2 stylos à insuline.	Plusieurs stylos à insuline et matériel d'autosurveillance glycémique.
	Matériaux de la poche thermique	Tissu synthétique antibactérien.	
	Composition des cristaux	Polymère hautement absorbant qui ne présente aucun risque pour la santé des personnes ou de l'environnement. Ni toxique, ni inflammable.	
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Température	De +5°C à +40°C	
	Taux d'humidité	15 – 93 %	
	Pression atmosphérique	70 – 106 kPa	
<b>CONDITIONS DE CONSERVATION</b>	Intervalle de température	De -20°C à +55°C	
	Taux d'humidité	0 - 93 %	
	Pression atmosphérique	50 – 106 kPa	

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

<b>Modèles disponibles :</b>	<b>Wellion® FRIGO L</b>	<b>Wellion® FRIGO XXL</b>
<b>Référence interne :</b>	WELLFRIGOL	WELLFRIGOXXL
<b>Code ACL :</b>	6223978	6223979
<b>Conditionnement primaire :</b>	Emballage plastique 1 pièce : 22 cm (L) x 11,5 cm (H) x 1,5 cm (P)	Emballage plastique 1 pièce : 22 cm (L) x 22,5 cm (H) x 1,5 cm (P)
<b>Conditionnement secondaire :</b>	Carton de 100 pièces : 48 cm (L) x 37 cm (H) x 33 cm (P)	Carton de 50 pièces : 48 cm (L) x 25 cm (H) x 41 cm (P)





## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

### MODE D'EMPLOI

1. Secouez les poches pour distribuer de manière homogène les cristaux à l'intérieur des poches.
2. Immergez la poche interne Wellion® FRIGO dans de l'eau froide (Wellion® FRIGO L maximum 10 minutes, Wellion® FRIGO XXL maximum 12 minutes).
3. Les cristaux absorbent l'eau et forment un gel, la poche devient plus épaisse.
4. Essuyez la poche intérieure pour éliminer le surplus d'eau.
5. Replacez la poche interne dans la poche thermique Wellion® FRIGO : elle est prête pour accueillir l'insuline.

### UTILISATION PERMANENTE ET STOCKAGE

Plongez la poche intérieure Wellion® FRIGO uniquement dans de l'eau, si le gel s'est déjà reformé en cristaux. Lors de l'utilisation permanente de la poche, la période d'immersion est plus courte en fonction du degré d'humidité des cristaux. Sortez la poche intérieure de l'eau dès qu'elle est suffisamment gonflée.

### ATTENTION

NE PAS CONGELER le sac Wellion FRIGO ! Cela pourrait endommager les cristaux et influencer la fonction du sac frigo.



## FABRICANT & DISTRIBUTEUR

### FABRIQUANT

MED TRUST Handelsges.m.b.H  
Gewerbepark 10, A-7221 Marz (Autriche)

Certification EN ISO 13485 : 2016 par TÜV Rheinland (n°SX 60128605 0001)

### PAYS D'ORIGINE

Autriche

### REPRÉSENTANT FRANÇAIS (DISTRIBUTEUR)

MED TRUST France sarl  
Zone Industrielle Poujeau Pendu  
12 chemin de la Briqueterie  
33610 Canéjan (France)

### CONTACT

Tél : 05.33.06.17.17

Fax : 05.33.06.99.40

[www.medtrust.fr](http://www.medtrust.fr)

[info@medtrust.fr](mailto:info@medtrust.fr)

[commande@medtrust.fr](mailto:commande@medtrust.fr)

0 800 94 22 23 Service & appel gratuits

Document créé le 12/04/2021

