



## **Dépistage de l'apnée du sommeil** **Sleep apnea screen meter - RS01 Contec**

### **I. Instructions téléchargement du logiciel ResMon**

A l'intérieur de la boîte, vous avez une étiquette comme ci-dessous qui contient le lien et le code pour télécharger le logiciel ResMon.

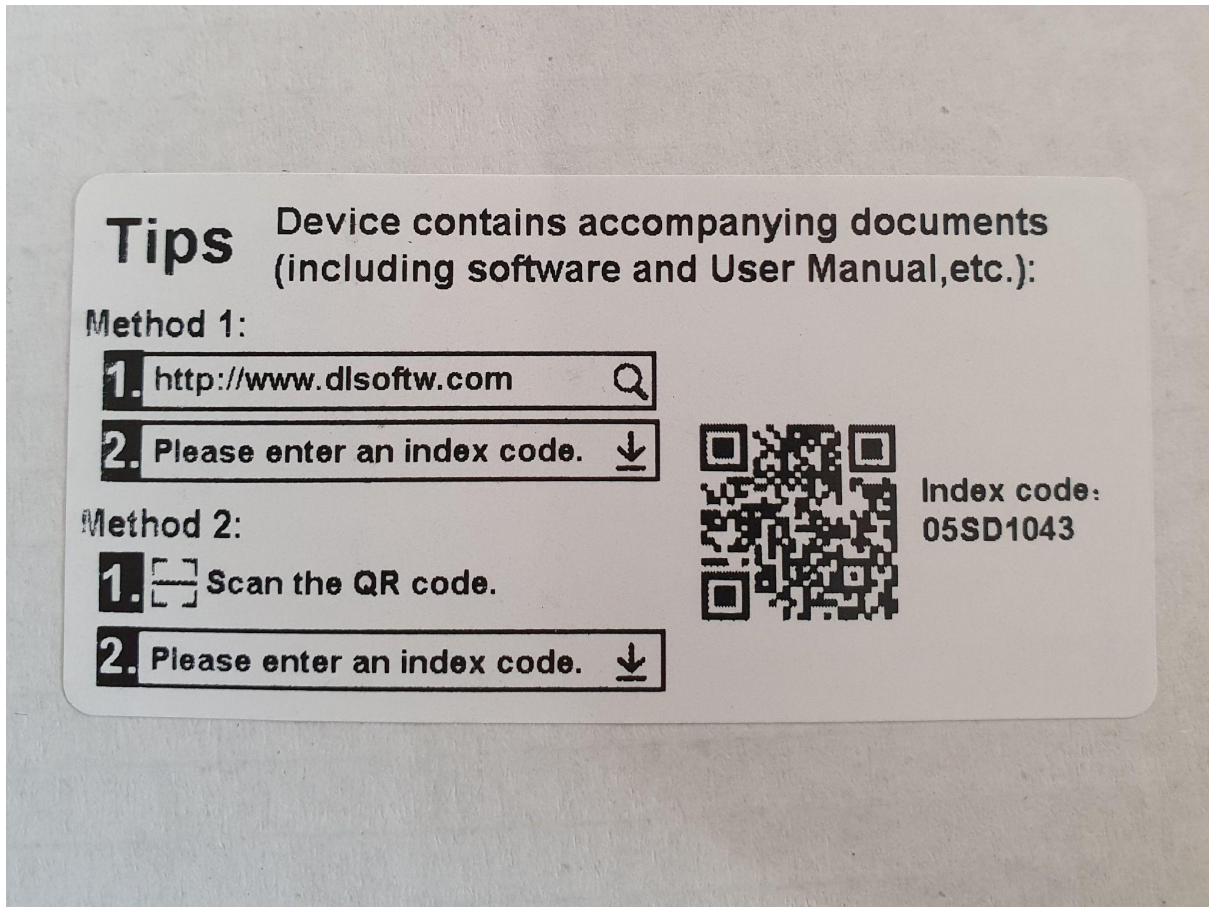


1/ Depuis votre PC, entrer le lien <https://www.dlsoftw.com> puis entrer le code donné et cliquer sur download :

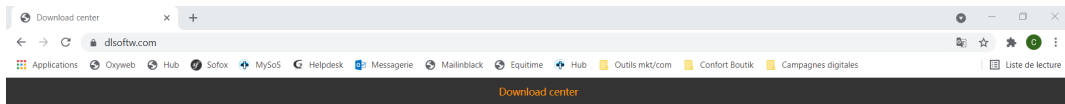


- Troubleshooting: if you are unable to open the zip file, please switch to a different browser to download the software.
- Please enter the index code

Un fichier zip se télécharge automatiquement.

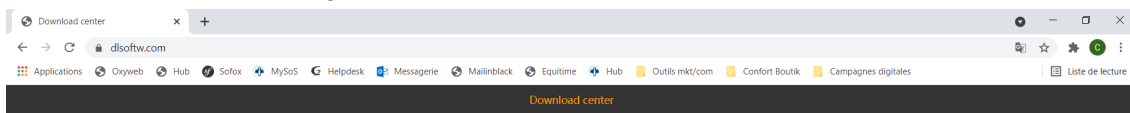

- Troubleshooting: if you are unable to open the zip file, please switch to a different browser to download the software.
- Please enter the index code

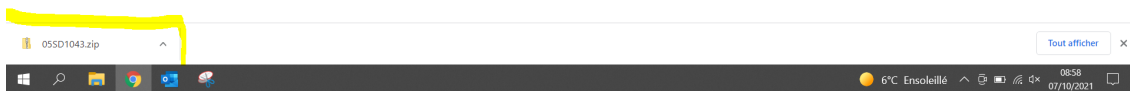


**2/** Pour ouvrir le fichier, allez dans votre dossier “téléchargements” sélectionner le fichier 05DS1043, faites un clic droit et cliquez sur “Extraire tout”, puis “Extraire”.

A présent, vous pouvez ouvrir le fichier et lancer l’installation du logiciel sur votre ordinateur.


Une autorisation pour l’installation du logiciel sur votre PC vous sera demandée.

**3/** La fenêtre du logiciel Setup - ResMon s’ouvre et l’installation peut commencer avec 3 étapes de configurations :

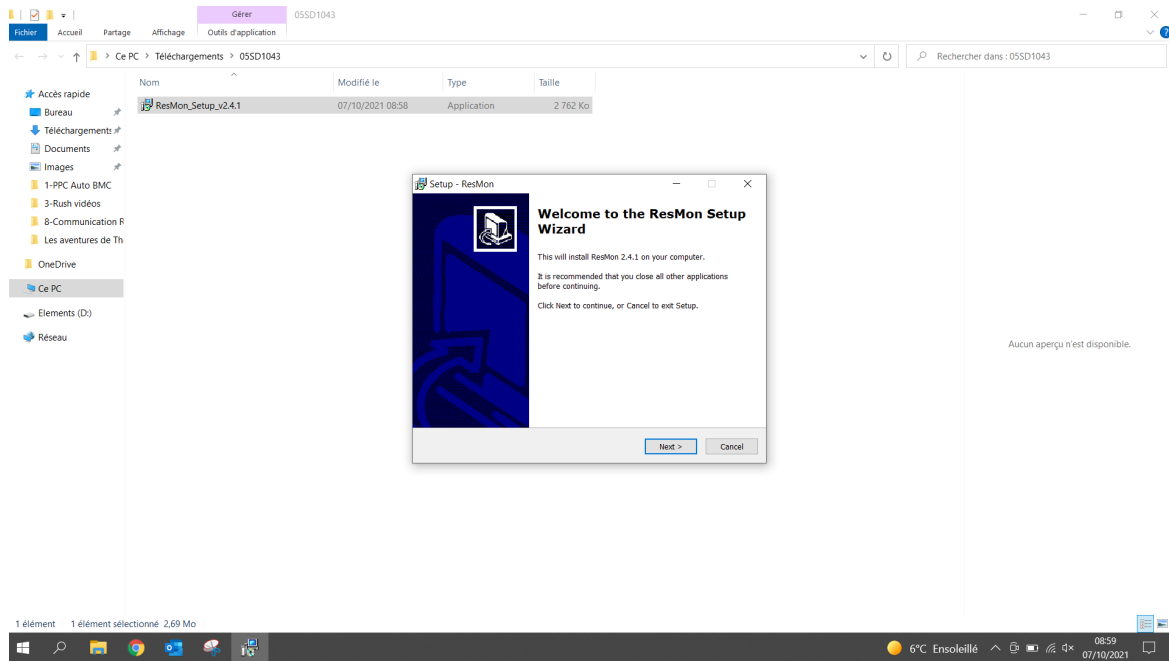


Cliquez sur Next.


4/ Ici, on vous demande de choisir l'emplacement du logiciel sur votre PC, il y a un emplacement par défaut dans vos programmes, sinon si vous souhaitez modifier cliquez sur **“Browse”** pour définir un autre emplacement. Puis **“Next”**

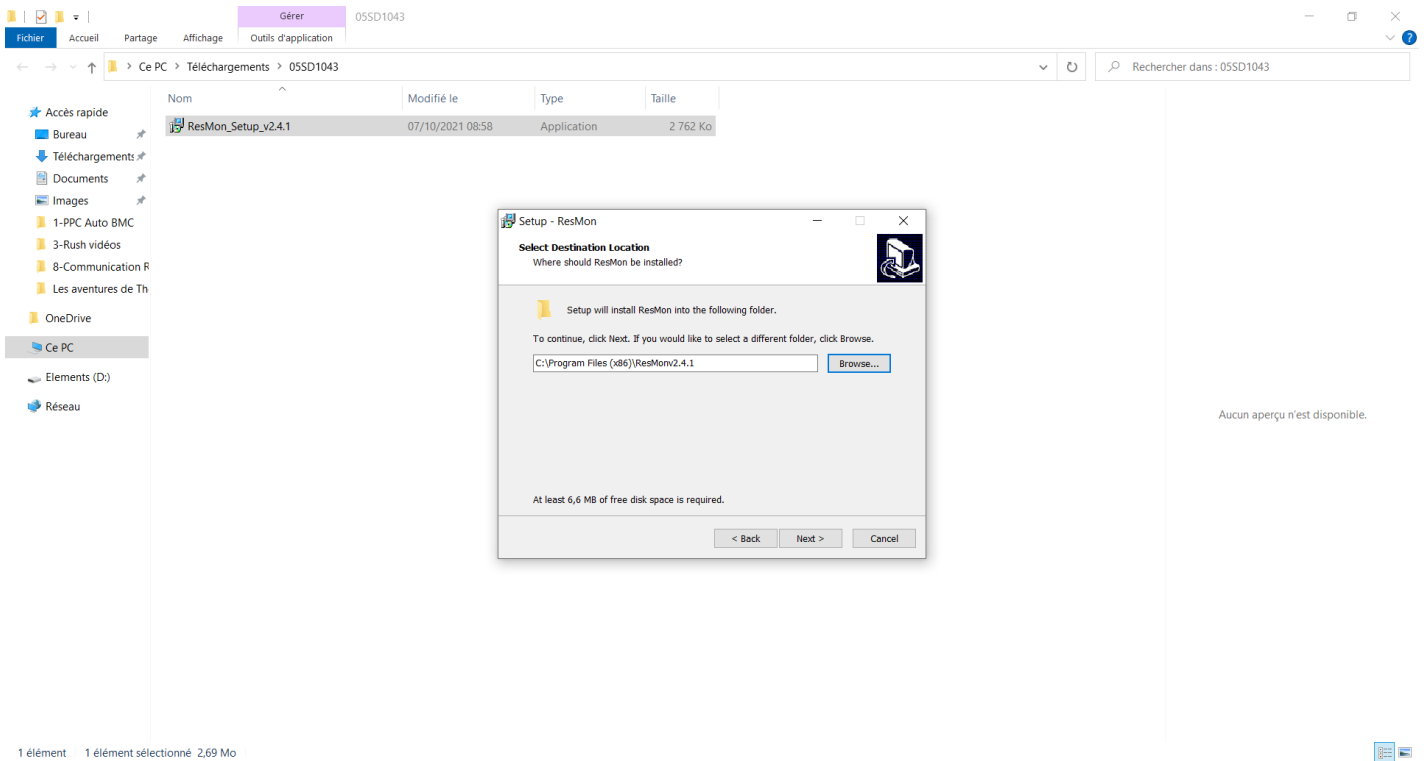


## 5/ Même procédé pour choisir l'emplacement du raccourci du logiciel, puis "Next" :

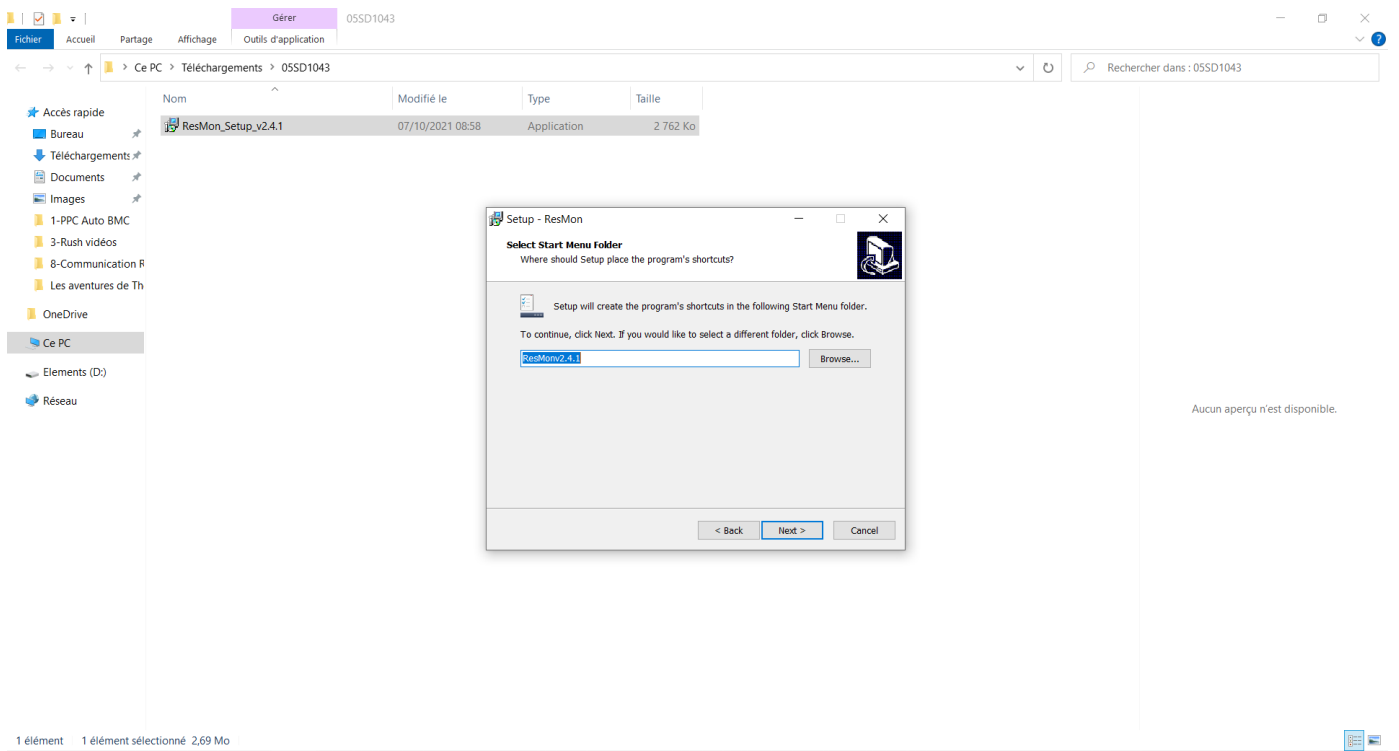


## 6/ Cocher la case pour créer une icône du logiciel sur votre bureau, puis "Next" :

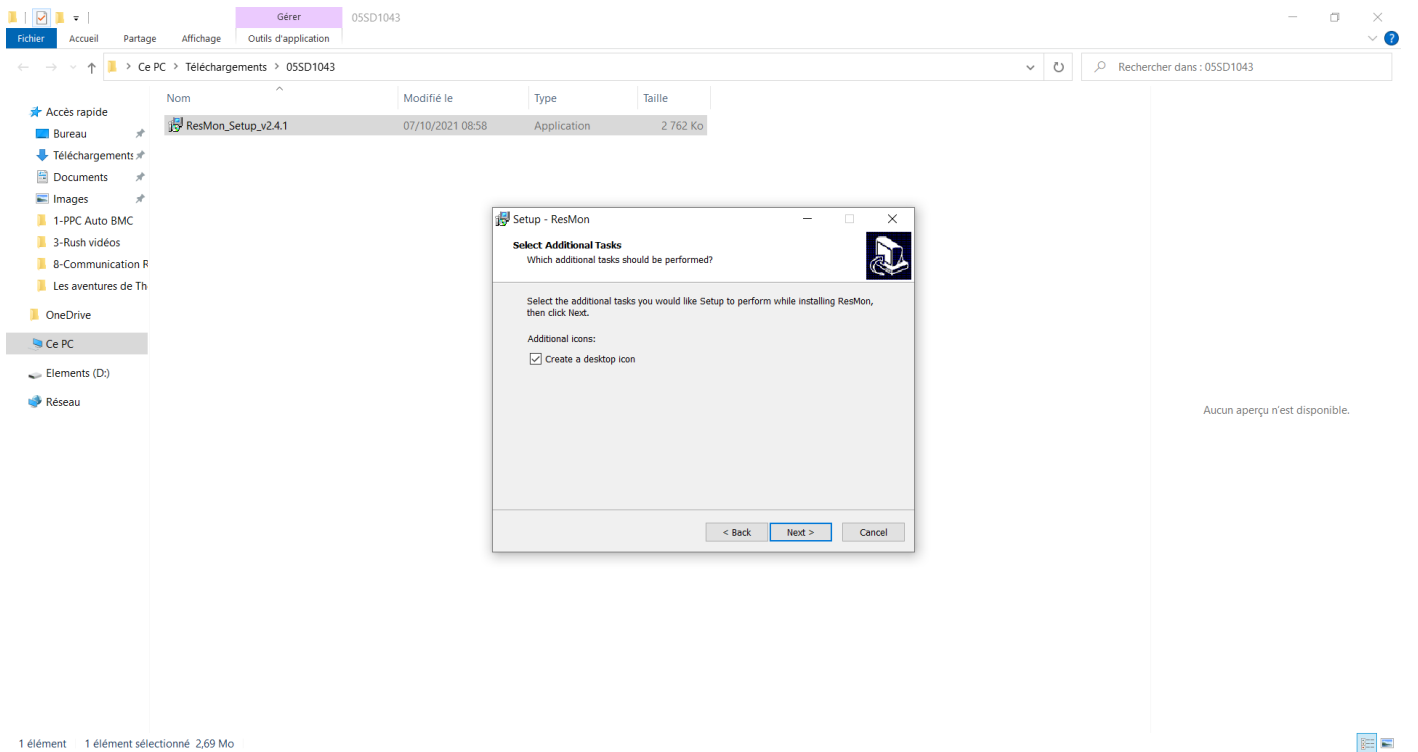

7/ Le logiciel est prêt à installer, voici un récapitulatif de la configuration effectuée. Cliquez sur “Install” :

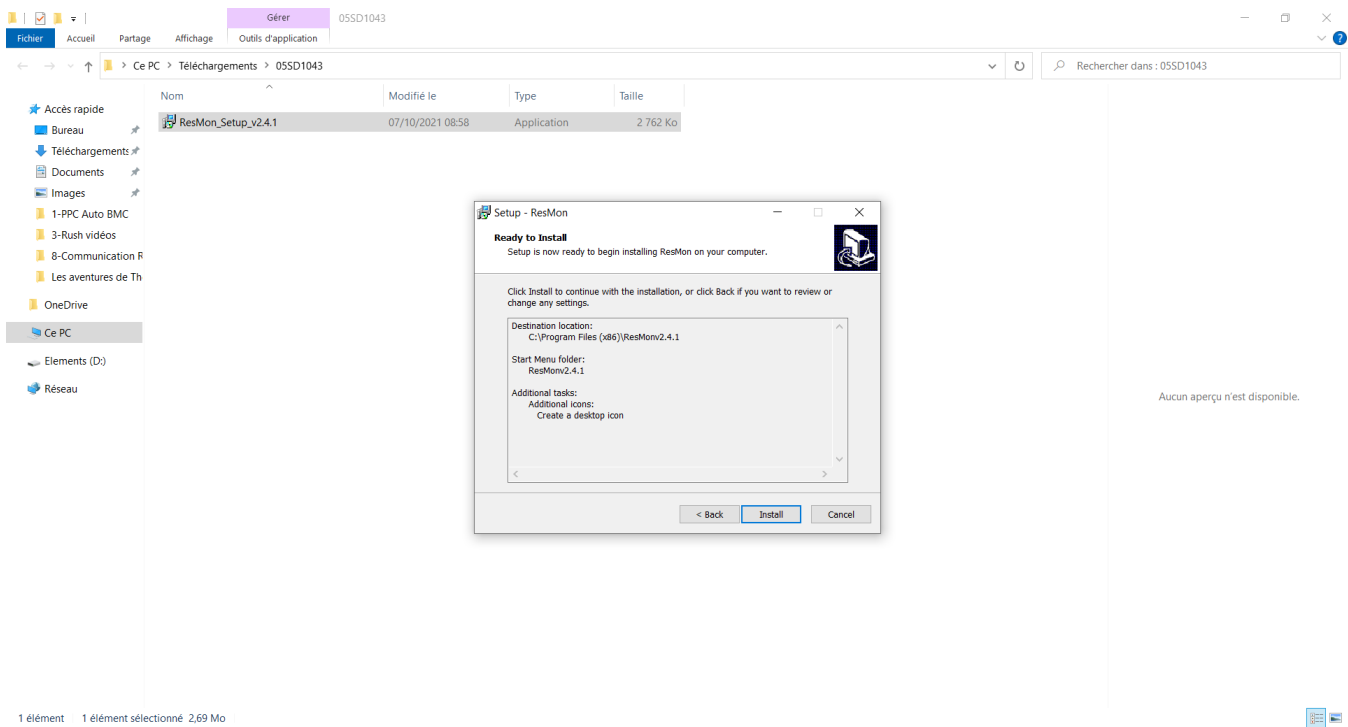

8/ Cochez la case pour lancer le logiciel, puis “Finish” :

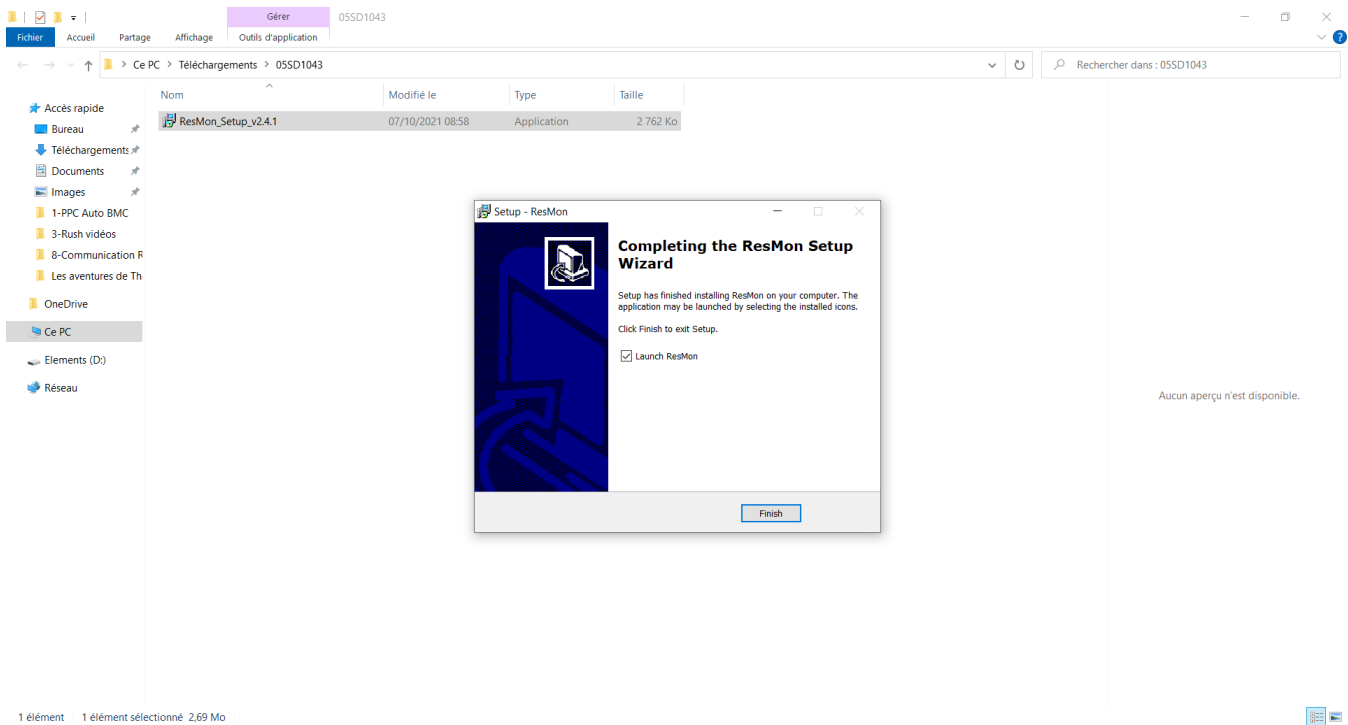

9/ L'installation est terminée, le logiciel s'ouvre.

Les langues disponibles pour le logiciel sont : anglais, italien, chinois.




## II. Importation des données

1/ Pour importer vos données :


- connecter l'appareil à votre PC en utilisant le câble USB
- une fenêtre doit s'ouvrir, elle contient toutes les données enregistrées sur l'appareil
- copiez et collez ces données (l'ensemble des fichiers disponibles) dans un nouveau dossier sur votre PC
- revenez sur le logiciel ResMon, et cliquez sur "**Import Case Data**"
- ouvrez votre dossier contenant vos données

2/ Dans **Case Manage**, vous trouverez une case "test", il s'agit d'un exemple de profil d'un patient. Vous pouvez le supprimer si vous le souhaitez.

Sinon vous pouvez exporter vos données en cliquant sur "**Export**" et créer votre profil en indiquant les différentes informations (nom, âge, genre, date de naissance, etc).

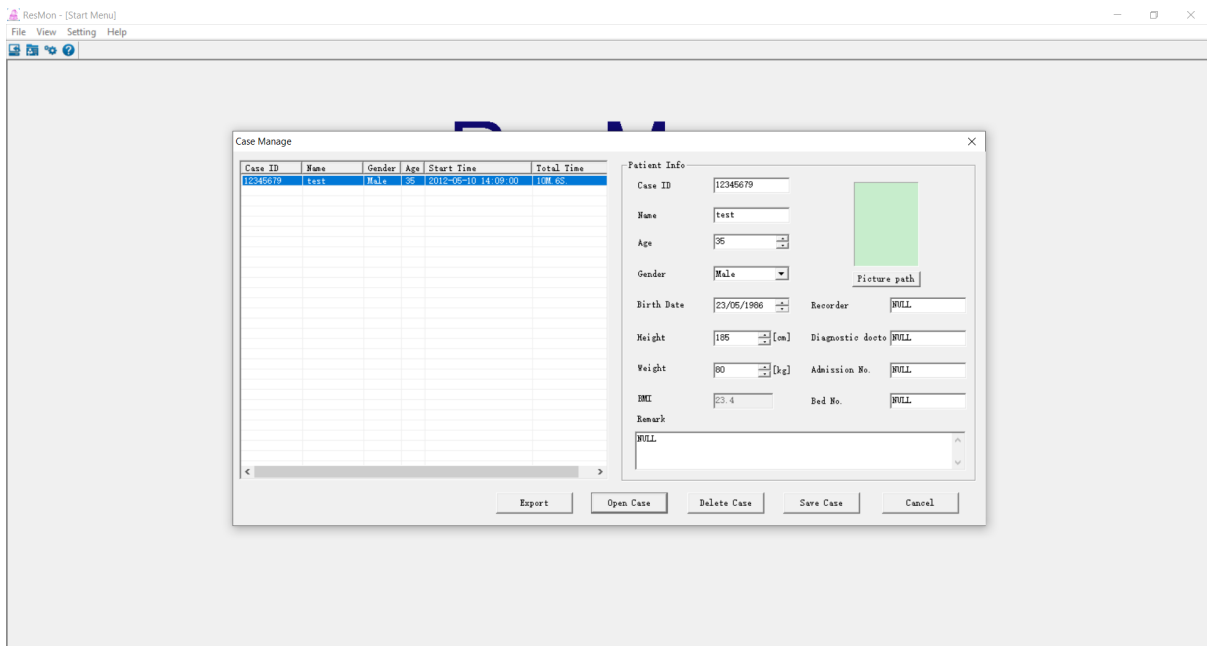

“Open case” → ouvre votre enregistrement avec les données comportant le flux nasal (Flow), l’oxygène (spO2), la fréquence cardiaque (Pulse) et les mouvements de votre cage thoracique (Pleth).

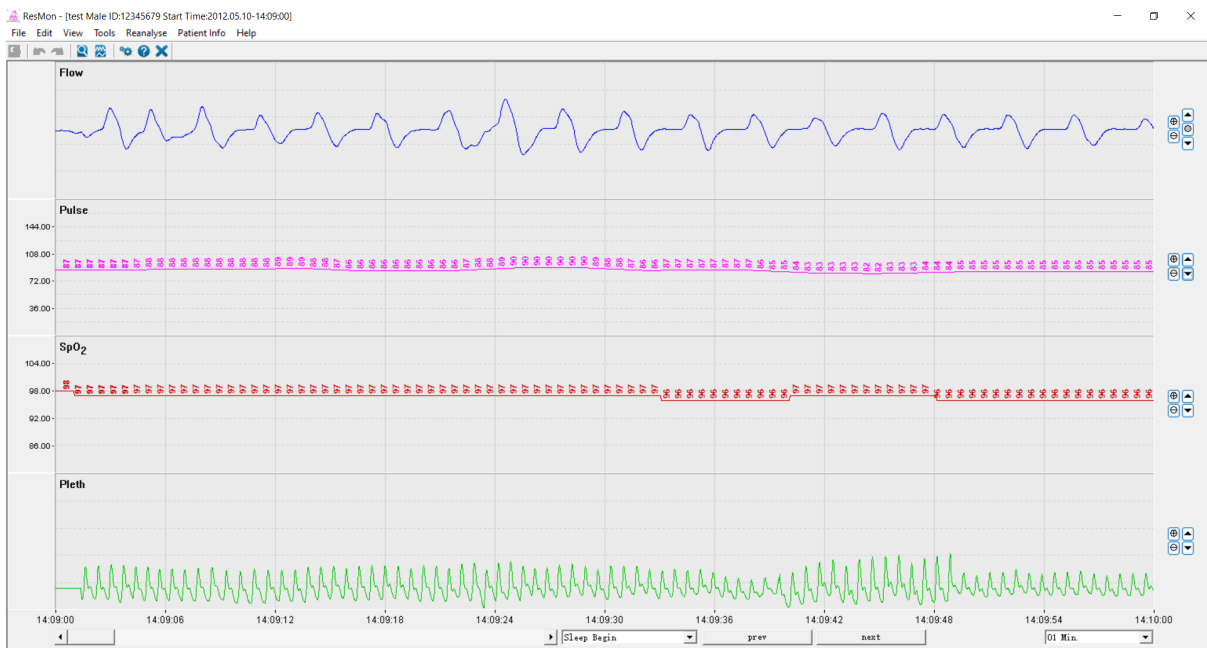

Cliquez sur “File” puis “Quit” pour fermer et revenir au menu.

“Delete Case” → supprime le profil

“Save Case” → enregistre le profil

3/ Pour générer un rapport complet et schématisé de votre enregistrement, allez dans **“Case Manage”**, choisissez la case de votre profil avec l’enregistrement que vous voulez, puis cliquez sur **“View”** et **“Report View”**.

The screenshot displays the ResMon software interface with the following sections:

- Patient Info:**

Name	test	Department No.	Height(cm)	185
ID	12345679	Admission.No.	Weight(kg)	80
Gender	Male	Bed No.	BMI	23.4
Age	35			
- Respiratory:**

Start Date	05/10/2012				
Record Time	05/10/2012 14:09:00	End Time	05/10/2012 14:19:06	Time Dur	00:10:06
Sleep time	05/10/2012 14:09:00		05/10/2012 14:19:06		00:10:06
- Breath Analysis:**

Apnea/Hypopnea Index(AHI): 29.70

Min Apnea	Duration(sec)	Occur Time	Min SpO2	
Min Apnea	29	14:15:40	93%	
Min Hypopnea	41	14:14:25	94%	
<b>Total</b>				
Apnea	3	00:01:03	10.43%	17.62
Hypopnea	2	00:01:18	12.96%	11.88
<b>Total sum of breath</b> 163				
<b>Average ratio of breath(BPM)</b> 16				

Summary: Apnea 10.43%, Hypopnea 12.96%, Total 23.39%
- SpO2 Analysis:**

Dev. Index(ODI)	Max	Time
Dev. Index(ODI)	11.88	--
Total	2	00:01:29
Baseline Saturation	95	--
Ave SpO2 (%)	95	--
SpO2 > 90%	0	00:00:00
SpO2 < 90%	0	00:00:00
Max Dev. (%)	4	14:14:40
Ave Dev. time(sec)	--	44
Longest Dev(sec)	50	14:17:07
Ave Min Dev. (%)	93	--
Absent	--	00:00:00

Summary: Average 98%, Absent 0.00%, Max Dev 4.00%, Longest Dev 50.00%

Physician NULL Date 2021-10-07

Cliquez sur **“Close”** pour fermer.

Et pour revenir au menu principal, cliquez sur **“File”** puis **“Quit”**.



[www.confortboutik.com](http://www.confortboutik.com)