


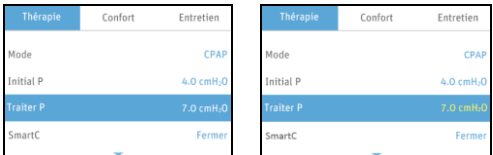
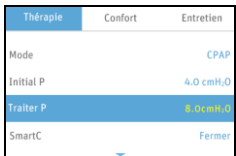
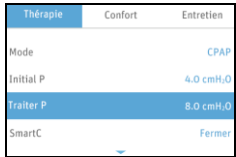

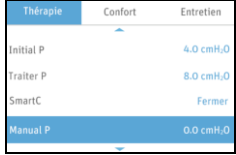



## Paramètres du Menu Clinique du G3 A20 / G3 C20

### 1. Étapes pour Naviguer dans le Menu Clinique

Le menu de Clinique est destiné seulement aux cliniciens.

<p><b>A. Accéder à l'interface Principale</b></p> <p>Branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur d'alimentation correctement. L'écran affiche l'Interface Principale illustrée dans la Fig.1-1.</p>	 <p>Fig.1-1</p>
<p><b>B. Présentation de l'interface Initiale de Configuration</b></p> <p>Dans l'interface principale illustrée dans la Fig.1-1, appuyez et maintenez enfoncé le <b>Bouton de Réglage</b> et le <b>Bouton Accueil</b> pendant cinq secondes. L'écran affiche l'interface initiale de configuration du menu Clinique, comme illustré dans la Fig.1-2.</p> <p>La première icône <b>Thérapie</b> indique le menu des paramètres de thérapie, la deuxième icône <b>Confort</b> indique le menu des paramètres de confort, la troisième icône <b>Entretien</b> indique le menu de maintenance. En tournant le <b>Bouton de Réglage</b>, le curseur bascule parmi les trois icônes, et le menu qui s'affiche sur l'écran change en conséquence.</p>	 <p>Fig.1-2</p>
<p><b>C. Accéder à l'interface de configuration</b></p> <p>Lorsque le curseur se trouve sur l'icône <b>Thérapie</b>, l'écran affiche l'interface de configuration du menu Thérapie. Accéder à l'Interface de Configuration de la Thérapie en appuyant sur le <b>Bouton de Réglage</b>. La première option (<b>Mode</b>) sur l'Interface de Thérapie s'affiche alors en bleu, comme indiqué à la Fig.1-3.</p>	 <p>Fig.1-3</p>
<p><b>D. Sélectionner Les options</b></p> <p>Lorsque vous tournez le <b>Bouton de Réglage</b> dans le sens des aiguilles d'une montre, le curseur se déplace vers le bas, d'une option à une autre. Lorsque vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le curseur se déplace vers le haut. Lorsque le curseur est sur une certaine option, appuyez sur le <b>Bouton de Réglage</b>, et alors l'option s'affiche en jaune, ce qui signifie que l'option peut maintenant être réglée, comme illustré par l'option <b>Réglage P</b> à la Fig.1-4.</p>	 <p>Fig.1-4</p>
<p><b>E. Réglage des options</b></p> <p>Réglez l'option en tournant le <b>Bouton de Réglage</b>. Comme indiqué à la Fig.1-5, l'option <b>Réglage P</b> est sélectionnée. Tournez le <b>Bouton de Réglage</b> pour ajuster l'option. A ce moment, l'option <b>Réglage P</b> est toujours affichée en jaune.</p>	 <p>Fig.1-5</p>
<p><b>F. Valider les Modifications</b></p> <p>Validez votre modification à une option en appuyant sur le <b>Bouton de Réglage</b>. L'option s'affiche alors en blanc, comme indiqué à la Fig.1-6.</p>	 <p>Fig.1-6</p>
<p><b>G. Tourner les Pages</b></p> <p>Lorsque le curseur est sur <b>SmartC</b>, la dernière option illustrée à la Fig.1-6, les options restantes apparaîtront sur une nouvelle page si vous continuez à tourner le <b>Bouton de Réglage</b> dans le sens des aiguilles d'une montre, comme indiqué à la Fig.1-7.</p> <p>Remarque:  sont des symboles de tourne pages.</p>	 <p>Fig.1-7</p>
<p><b>H. Revenir à l'interface de configuration initiale</b></p> <p>Appuyez sur le <b>Bouton Accueil</b> pour retourner à l'Interface de Configuration Initiale, comme indiqué à la Fig.1-8.</p>	 <p>Fig.1-8</p>
<p><b>I. Quitter le Menu Clinique</b></p> <p>Appuyez sur le <b>Bouton Accueil</b> pour quitter le Menu Clinique. L'écran affichera l'interface principale illustrée à la Fig.1-1.</p>	<p>/</p>

## 2. Étapes pour la Navigation dans le Menu Confort et Maintenance

Le menu de service n'est disponible qu'aux ingénieurs autorisés du service à la clientèle.

Pour naviguer dans le menu Confort ou menu Entretien, vous pouvez vous reporter aux étapes A-J pour naviguer dans le menu Clinique, à savoir mettre en place l'Interface de configuration initiale, pour l'accès à l'interface de configuration, pour sélectionner des options, pour régler des options, pour confirmer les modifications, pour tourner les pages, pour retourner à l'interface de configuration initiale et pour quitter le menu Clinique. Ces étapes sont similaires pour les menus Confort et Entretien Service. L'Interface de Configuration Initiale du Menu Confort est montrée dans la Fig.1-9. L'Interface de Configuration Initiale du Menu Maintenance est montrée dans la Fig.1-10.

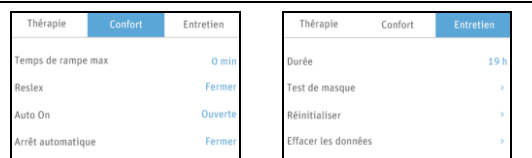


Fig.1-9

Fig.1-10

## 3. Description des paramètres du menu Thérapie

Mode		Gamme	Description
CPAP	AutoCPAP		
Initial P	Initial P	CPAP: 4,0 - Traiter P hPa AutoCPAP:4,0 - Min APAP hPa	Cette pression est la pression de traitement du début avant le temps de rampe. Quand vous tournez <b>le Bouton de Réglage</b> vers le point le plus proche, la numérotation augmente ou diminue de 0,5 hPa
Traiter P	—	4,0 ~ 20,0 hPa	Cette pression est la pression de traitement fixe après le temps de rampe. Quand vous tournez <b>le Bouton de Réglage</b> vers le point le plus proche, la numérotation augmente ou diminue de 0,5 hPa
SmartC	—	Ouverte / Fermer	Tournez <b>le Bouton de Réglage</b> pour modifier le réglage de cette fonction
Smart P	Smart P	—	Lorsque SmartC ou SmartA est activé, Smart P s'affichera. Smart P est la nouvelle pression de traitement, la valeur de Smart P varie en fonction des événements respiratoires. Les paramètres ne peuvent pas être modifiés manuellement
—	Min APAP	4,0 ~ 20,0 hPa	Quand vous tournez <b>le Bouton de Réglage</b> vers le point le plus proche, la numérotation augmente ou diminue de 0,5 hPa
Manual P	—	0,0 ~ 2,0 hPa	Cette fonction permet au patient de régler la pression de traitement au sein dans une fourchette limitée avec le consentement du médecin. Quand vous tournez <b>le Bouton de Réglage</b> vers le point le plus proche, la numérotation augmente ou diminue de 0,5 hPa
—	Max APAP	Min APAP ~ 20,0 hPa	Quand vous tournez <b>le Bouton de Réglage</b> vers le point le plus proche, la numérotation augmente ou diminue de 0,5 hPa
—	SmartA	Ouverte / Fermer	Lorsque le SmartA est réglé sur Activé, en fonction des événements de sommeil du patient au cours des derniers jours, l'appareil peut régler automatiquement le niveau de pression du début et la plage de pression. Tournez <b>le Bouton de Réglage</b> pour modifier le réglage de cette fonction
—	Smart Min P	—	Lorsque SmartA est activé, Smart Min P s'affichera. Smart Min P est le nouveau Min APAP pour le mode AutoCPAP, la valeur de Smart Min P varie en fonction des événements respiratoires. Les paramètres ne peuvent pas être modifiés manuellement.
—	Smart Max P	—	Lorsque SmartA est activé, Smart Max P s'affichera. Smart Max P est le nouveau Min APAP pour le mode AutoCPAP, la valeur de Smart Max P varie en fonction des événements respiratoires. Les paramètres ne peuvent pas être modifiés manuellement.
—	Sensibilité	1 ~ 5	Quand vous tournez <b>le Bouton de Réglage</b> vers le point le plus proche, la numérotation augmente ou diminue de 1
Alerte de fuite	Alerte de fuite	Ouverte / Fermer	Cette fonction permet à l'appareil de produire une alerte sonore lorsque le masque tombe accidentellement du visage du patient. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la fonction Auto Off est désactivée. Tournez <b>le Bouton de Réglage</b> pour modifier le réglage de cette fonction

## 4. Description des Paramètres du Menu Confort

Options	Gamme	Description
Temps de rampe max	0 ~ 60 min	Le temps de rampe varie de 0 à 60 minutes. Quand vous tournez <b>le Bouton de Réglage</b> vers le point le plus proche, la numérotation augmente ou diminue de cinq minutes
Reslex	Patient, Fermer, 1 ~ 3	Cette fonction permet à l'appareil de détecter automatiquement le rythme respiratoire du patient et de réduire la pression dans le masque pendant l'expiration, afin de rendre le patient plus confortable. Seulement lorsque l'option Flex Expi est réglée sur "Patient", l'option apparaîtra dans le menu Patient. Si cette option est réglée sur "Eteindre" ou "1 ~ 3", elle n'apparaît pas dans le menu Patient. Tournez <b>le Bouton de Réglage</b> pour modifier le réglage de cette fonction
Auto On	Ouverte / Fermer	Cette fonction permet à l'appareil de démarrer automatiquement et de produire de l'air suivant une pression programmée après que le patient ait pris quelques respirations profondes tout en portant le masque. Tournez <b>le Bouton de Réglage</b> pour modifier le réglage de cette fonction
Arrêt automatique	Ouverte / Fermer	Cette fonction permet à l'appareil d'interrompre automatiquement la thérapie et de l'éteindre lorsque le masque est retiré. Tournez <b>le Bouton de Réglage</b> pour modifier le réglage de cette fonction

## 5. Description des paramètres du menu Service

Options	Gamme	Description
Durée	—	Affiche le temps total de fonctionnement de l'appareil
Test de masque	Démarrez le Test du Masque	Mesurer la fuite du masque et classer les masques non BMC tels que Autre
Réinitialiser	—	Tournez <b>le Bouton de Réglage</b> à choisir de rétablir des valeurs
Effacer les données	—	Tournez <b>le Bouton de Réglage</b> à choisir d'effacer toutes les données
Étalonnage de la pression	Démarrez l'Étalonnage de Pression	Cette fonction permet à l'appareil d'effectuer l'étalonnage de pression
Unité de pression	hPa / cmH <sub>2</sub> O	Optez d'exprimer la pression en hPa ou cmH <sub>2</sub> O
Service	—	Si vous avez besoin de cette fonction, veuillez vous connecter à des techniciens de maintenance