


FICHE PRATIQUE

NETTOYAGE DU MASQUE PPC

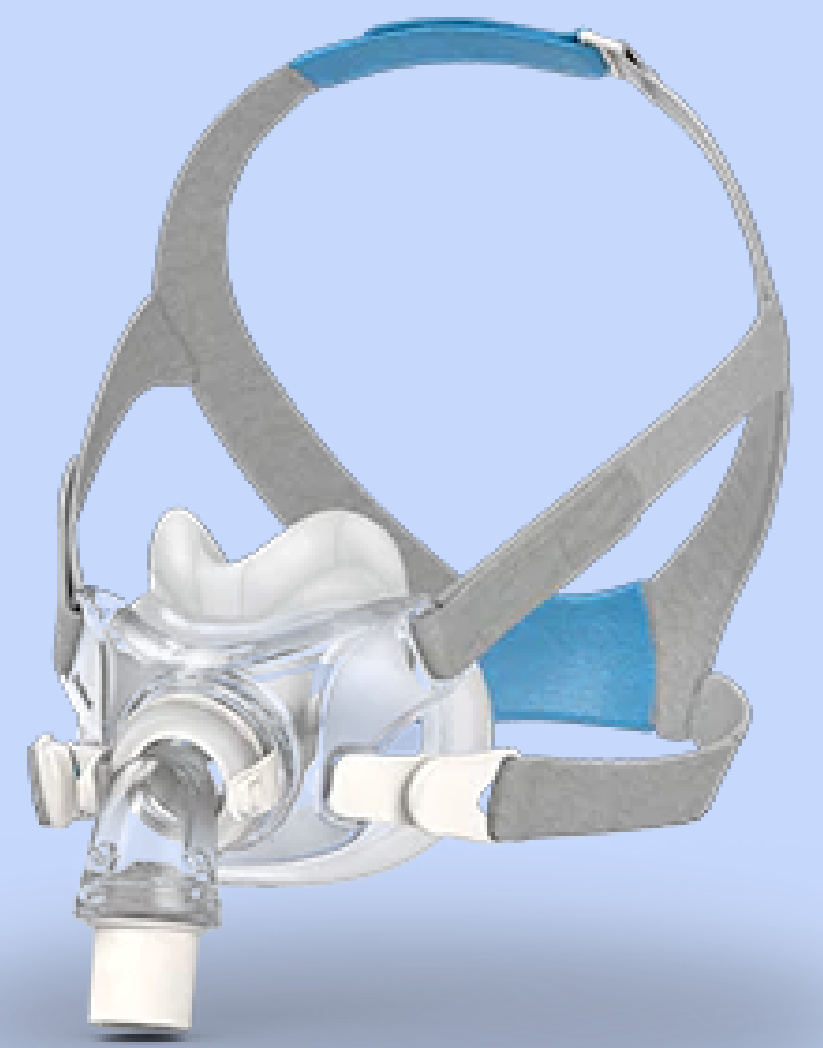

01 Nettoyage du masque PPC

- Retirez le harnais du masque.
- Lavez le masque à l'eau tiède savonneuse pour enlever sébum et impuretés.
- Rincez abondamment à l'eau claire.
- Séchez le masque à l'air libre, à l'abri du soleil pour préserver sa durée de vie.

Fréquence : 1 à 2 fois par semaine

Astuce : un masque propre assure une meilleure étanchéité et un confort optimal pendant la nuit.

02 Nettoyage du harnais

- Option 1 : Lavez le harnais directement en machine à laver.
- Option 2 : Lavez-le à la main dans de l'eau tiède savonneuse, puis rincez à l'eau claire.

Fréquence : 1 fois par mois, ou 2 à 3 fois si vous transpirez beaucoup

Attention : ne jamais sécher les éléments au soleil, car cela réduit leur durée de vie. Laissez sécher à l'air libre.

Conseil : un harnais bien entretenu conserve son élasticité et assure le maintien optimal du masque chaque nuit.